




RSUD dr.R.Goeteng
Taroenadibrata Purbalingga

PEMERIKSAAN RAPID TEST COVID-19 (METODE LATERAL FLOW)

No. Dokumen <i>067/066/2020</i>	No. Revisi	Halaman ...
Tanggal Terbit 3 Juni 2020	 <p style="text-align: center;">Ditetapkan kepada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Dr. Nonot Mulyono, M.kes. Pembina Utama Muda NIP.19620909 193802 1 011</p>	

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (S.P.O)

Pengertian	Pemeriksaan untuk mengetahui adanya antibody terhadap virus Covid-19 dalam darah /serum pasien.																																								
Tujuan	Menegakkan diagnosa suatu penyakit.																																								
Kebijakan	Kebijakan Pelayanan Laboratorium di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga No.066/212/2015.																																								
Prosedur	<p>1. Materi</p> <ol style="list-style-type: none"> Derah Serum Plasma Plat stick Covid-19 kit Buffer kit <p>2. Persiapan Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> Mikro Pipet 10 ul Centrifuge Timo Biological Safety Cabinet (BIOBASE) <p>3. Tata Laksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Centrifuge darah pasien untuk mendapatkan serum/plasma Pipet 10 ul serum/plasma, masukkan kedalam lubang sampel. Tambahkan ± 2 - 3 tetes buffer kedalam lubang buffer. Baca hasil setelah 15 menit, tidak boleh lebih 20 menit. <p>4. Pembacaan Hasil</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">IgG</td> <td style="text-align: center;">IgM</td> <td style="text-align: center;">O</td> <td>Hasil Test Covid-19 Positif IgG</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Terbentuk garis merah pada kolom control dan IgG saja.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">IgG</td> <td style="text-align: center;">IgM</td> <td style="text-align: center;">O</td> <td>Hasil Test Covid-19 Negatif</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Terbentuk garis merah pada kolom control saja.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">IgG</td> <td style="text-align: center;">IgM</td> <td style="text-align: center;">O</td> <td>Hasil Test Covid-19 Positif IgM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Terbentuk garis merah pada kolom control dan IgM saja.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: center;">IgG</td> <td style="text-align: center;">IgM</td> <td style="text-align: center;">O</td> <td>Hasil Test Covid-19 Positif IgG & IgM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Terbentuk garis merah pada kolom control, IgG dan IgM.</td> </tr> </table>	C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Positif IgG					Terbentuk garis merah pada kolom control dan IgG saja.	C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Negatif					Terbentuk garis merah pada kolom control saja.	C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Positif IgM					Terbentuk garis merah pada kolom control dan IgM saja.	C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Positif IgG & IgM					Terbentuk garis merah pada kolom control, IgG dan IgM.
C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Positif IgG																																					
				Terbentuk garis merah pada kolom control dan IgG saja.																																					
C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Negatif																																					
				Terbentuk garis merah pada kolom control saja.																																					
C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Positif IgM																																					
				Terbentuk garis merah pada kolom control dan IgM saja.																																					
C	IgG	IgM	O	Hasil Test Covid-19 Positif IgG & IgM																																					
				Terbentuk garis merah pada kolom control, IgG dan IgM.																																					
Unit Terkait	Instansi Laboratorium.																																								